

## ÉTAPE 1

Kit d'identification  
et de dépistage BVD



## ÉTAPE 2

Mise en place  
des boucles  
sur les pinces



## ÉTAPE 3

Pose de la boucle de  
dépistage BVD  
sur l'oreille droite



!! Bonne  
contention  
du veau !!

## ÉTAPE 4

Pose de la boucle  
d'identification  
sur l'oreille gauche



## ÉTAPE 5

Placement du tube  
sur le trocart



## ÉTAPE 6

Échantillon placé dans  
le sachet plastique et  
l'enveloppe matelassée



## ÉTAPE 7

Ajout de la date de  
prélèvement et l'étiquette  
adresse du laboratoire



## ÉTAPE 8

Envoi du prélèvement  
au laboratoire  
dans les 48 h



### IMPORTANT

Utiliser la pince adaptée à la boucle préleveuse

Poser la boucle de dépistage BVD en premier, avec une bonne contention du veau

Clipser le tube sur le trocart, le numéro d'identification du tube doit correspondre à celui du trocart

Mettre au maximum 3 échantillons par enveloppe