

Notice complémentaire boucle ULTRA Flex-TST (FR16)

A FAIRE / A PROSCRIRE



Attention, la position de la boucle dans la pince est primordiale

La partie mâle n'est pas assez enfoncée, il y a un espace

L'aiguille ne dépasse pas du fût de la partie mâle




**CASSE, TORSION, RECU de l'aiguille
=> MAUVAIS PRELEVEMENT
ou/et MAUVAISE POSE**

Notice complémentaire boucle ULTRA Flex-TST (FR16)

A FAIRE / A PROSCRIRE



Attention, ne pas endommager le capuchon vert

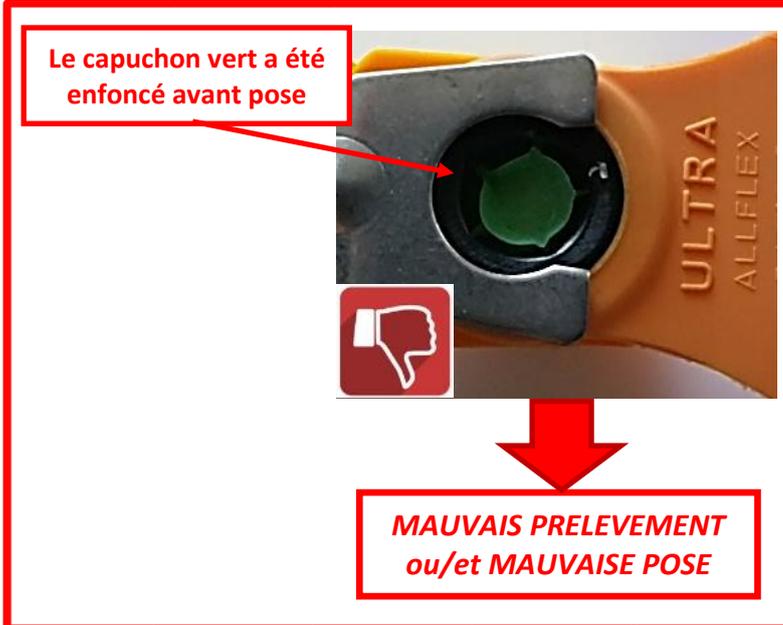

⚠ Attention, la contention de l'animal est primordiale
L'animal ne doit pas bouger pendant le prélèvement et la pose **⚠**

Bloquez le veau, attachez-le, faites-vous aider, ...



⚠
**SI PAS DE CONTENTION,
 DE TENUE / MAINTIEN DE L'ANIMAL
 => MAUVAIS PRELEVEMENT
 ou/et MAUVAISE POSE**